


## Procédure de déblocage des systèmes d'aspiration



**Avant toute intervention, couper l'alimentation électrique du fauteuil ainsi que l'aspiration.**



**Pour les praticiens équipés de moteur UNIJET 75 :**

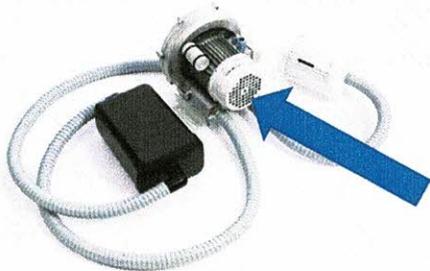


Insérer un tournevis plat assez large à travers le centre de la grille de protection afin de faire tourner l'axe du moteur.

Pour les systèmes capotés : vous avez accès à l'axe du moteur en démontant le cache plastique noir.



**Pour les praticiens équipés de systèmes DURR DENTAL (VS et VSA) :**

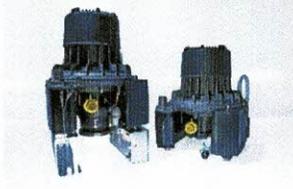

Insérer un tournevis plat au centre du cache noir afin de faire tourner la pale du ventilateur, celle-ci est raccordée sur l'axe du moteur. Vous devez sentir le moteur tourner et non l'hélice riper sur l'axe. Dans ce cas, veuillez nous contacter.

**Pour les praticiens équipés de systèmes CATTANI MICROSMART ou TURBOSMART :**

Dévisser la flasque du moteur à l'aide d'un tournevis Torx de 20. Sortir la flasque du moteur, la nettoyer et débloquer la pale à l'intérieur. Ensuite remonter la flasque.



**Si besoin nous restons à votre disposition et vous invitons à nous joindre :**

**Nicolas Rol** : Technico-commercial matériel

Port : 06.82.60.81.84 – Mail : nicolas.rol@denta3d.fr

**Jean-Marie Segala** : Technico-commercial matériel

Port : 06.31.37.67.49 – Mail : jm.segala@denta3d.fr

**Cyril Ribaut** : Technico-commercial matériel

Port : 07.87.26.82.25 – Mail : cyril.ribaut@denta3d.fr